



ResMed

Nox T3s, Diagnose schlafbezogener Atmungsstörungen

Die Polygraphie:

eine Form der nächtlichen Atmungsaufzeichnung.



Wird üblicherweise zu Hause durchgeführt.



Wird während Ihres normalen nächtlichen Schlafs durchgeführt.



Beinhaltet die Aufzeichnung von Atembewegungsanstrengung, nasalem Luftfluss und Sauerstoffgehalt im Blut.



Wird häufig zur Diagnose einer Schlaf-Apnoe eingesetzt.


Nasenbrille:
Hilft, Apnoen zu erkennen, während Sie schlafen

Schnarchsensoren:
Erkennt, wenn Sie schnarchen

Polygraphiesystem:
Analysiert Ihre Bewegungen und Ihre Körperlage und zeichnet Untersuchungsdaten auf

Brust- und Bauchgurte:
Helfen bei der Beurteilung Ihrer Atmung und bei der Erkennung verschiedener Apnoe-Formen

Pulsoximeter:
Misst nachts Ihre Sauerstoffsättigung und Ihren Puls

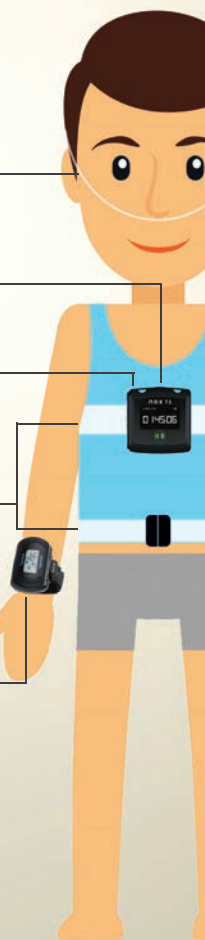


Wie geht es weiter?

Ihr Arzt wertet Ihre Daten aus, um die Diagnose „Schlaf-Apnoe“ abzuklären. Danach bespricht er mit Ihnen, wie Sie am besten behandelt werden.

Wie wird das Polygraphiesystem Nox T3s genutzt?

Ihr Arzt hat Ihnen eine Schlafmessung mit dem Nox T3s verschrieben. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie das Gerät anlegen.

Gerät und Gurte anlegen

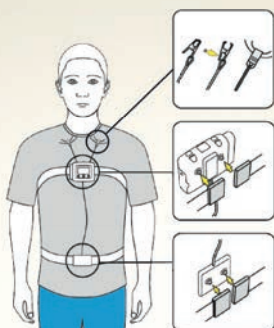

- 1 Klemmen am Schlafanzug oder T-Shirt befestigen.
- 2 Gurt um den Brustkorb führen und festziehen, dann die Gurtenden an der Rückseite des Geräts befestigen.
- 3 Diesen Schritt mit dem Bauchgurt wiederholen und den Bauchgurt am Kabel befestigen.

Nasenbrille anlegen



1

Nasenstecker in die Nasenlöcher einführen. Die Nasenstecker müssen dabei nach unten zeigen.



2

Schlauch hinter die Ohren legen.



3

Sicherungsring zum Kinn hochziehen. Nicht zu eng ziehen.

Oximeter anlegen



- 1 Oximeter am Handgelenk anbringen. Dann die Fingersonde auf den Zeigefinger stecken. Die Fingerspitze muss abgedeckt sein.
- 2 Die Sonde mit Tapeband fixieren. Das Gerät schaltet sich automatisch ein.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind, finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Nox-Produkte werden von Nox Medical hergestellt und von ResMed vertrieben. Informationen zum Hersteller der Nox-Geräte erhalten Sie bei ResMed als Vertragshändler. Die Produkterhältlichkeit kann regional variieren. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

© ResMed, 2022. · Art.Nr. 708183/1 (auf Grundlage von 708179/1 2022-01), Obj.-ID C308120 · 1 · 03 22